



LIRE ATTENTIVEMENT L'INTÉGRALITÉ DES PRÉSENTES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION DU PRODUIT. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR VISÉ : Le produit s'adresse à un professionnel dûment formé, au patient ou à l'aide-soignant. L'utilisateur doit être capable de lire et de comprendre l'ensemble des consignes, des avertissements et des précautions qui figurent dans le mode d'emploi, et être physiquement apte à les respecter.

UTILISATION/INDICATIONS : Conçu pour soutenir le bas du dos et peut convenir aux personnes souffrant de douleurs ou de dysfonctionnements au niveau des articulations sacro-iliaques, de douleurs lombaires, d'entorses ou de tensions dans le bas du dos.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE : Produit en textile/matériau semi-rigide, conçue pour restreindre le mouvement grâce à une construction élastique ou semi-rigide.

CONTRE-INDICATIONS : Problèmes pulmonaires, cardiovasculaires ou osseux que la compression et/ou la pression risquent d'aggraver, fractures déplacées, instables. Ne pas l'utiliser si vous êtes allergique à l'un des matériaux contenus dans ce produit.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE : En cas de douleur, d'enflure, d'altération de la sensation, de décoloration excessive, d'irritation de la peau ou d'autres réactions anormales lors de l'utilisation de ce produit, contacter immédiatement votre médecin. Cesser toute utilisation du dispositif si les panneaux de soutien sont déformés ou si un effilochage ou une détérioration des cordons est constaté(e). L'orthèse doit être portée par dessus les vêtements. La taille de l'orthèse doit être bien adaptée au patient pour assurer un bon maintien et un bon fonctionnement. Si l'orthèse ne s'ajuste pas bien, elle peut être ajustée par un professionnel de santé. Des précautions sont de rigueur avec les patients, notamment les personnes âgées. L'orthèse ne doit pas être trop serrée, car elle POURRAIT exercer une pression excessive. Il convient d'informer les patients de la tension appropriée à appliquer pendant les périodes d'utilisation continue. Le patient doit consulter un professionnel de santé pour échanger le produit en cas de problème de qualité survenant pendant la période de garantie. Ne pas exposer l'orthèse à des produits hydratants, à des produits chimiques ou à des solvants, au risque d'affecter sa durabilité. Ce produit doit être prescrit et installé par un professionnel dûment formé. La fréquence et la durée d'utilisation doivent être déterminées par votre professionnel de santé. Ne pas modifier le dispositif sans la présence d'un professionnel de santé. Ne pas utiliser le dispositif autrement que comme indiqué dans cette instruction d'utilisation. Garder hors de portée des enfants de moins de trois ans pour éviter l'ingestion accidentelle des petites pièces. Ne pas l'utiliser sur une plaie ouverte. Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé et/ou si l'emballage a été ouvert. **REMARQUE :** Contacter le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave résultant de l'utilisation de ce dispositif.

INFORMATIONS CONCERNANT L'APPLICATION :

DIMENSIONNEMENT DU DISPOSITIF :

- Mesurer le tour de taille du patient environ 2,5 cm (1 po) au-dessus de la circonférence la plus large des hanches. Lorsque le tour de taille du patient est entre deux tailles, choisir l'orthèse la plus grande.
- Faire correspondre avec la taille indiquée dans le tableau des tailles ci-dessous.

TAILLE	TOUR DE TAILLE
S/M	Inférieur à 122 cm (48 po)
L/XL	125 cm - 152 cm (49 po - 60 po)

AJUSTEMENT :

- Pour régler la circonférence de la ceinture, aligner la pointe de la fixation à crochet et à boucle sur la section du panneau arrière. Répéter la procédure pour le côté opposé. (Figure A)

REMARQUE : La languette peut être orientée à droite ou à gauche du patient, mais l'extérieur de la boucle avec le gant d'enfilage doit être attaché du côté opposé à la languette.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION :

4. Desserrer l'orthèse en détachant la languette de l'extérieur de la boucle et en tirant l'orthèse dans des directions opposées. (Figure B)
5. Enrouler la ceinture à environ 2,5 cm (1 po) au-dessus de la partie la plus large des hanches, en centrant la section arrière au niveau de la ligne médiane du bas du dos de manière à ce que la ceinture se trouve juste au-dessus du pli des fessiers. Fixer la partie à crochet du gant d'enfilage sur l'extérieur de la boucle. (Figure C)

REMARQUE : Pour remettre l'orthèse, la méthode la plus simple consiste à glisser une main dans la poche du gant d'enfilage pour orienter la ceinture.

6. Avant de serrer l'orthèse, vérifier que le panneau dorsal est positionné de manière équilibrée sur les deux côtés du patient.
7. Pour serrer l'orthèse, glisser les pouces dans l'orifice de la languette. Tirer loin du corps. Une fois serrée, fixer la languette sur l'extérieur de la boucle. Ajuster la compression si nécessaire. (Figure D)

RETRAIT DE L'ORTHÈSE

8. Détacher la languette de l'extérieur de la boucle pour desserrer l'orthèse. Décrocher le gant d'enfilage de l'extérieur de la boucle et retirer l'orthèse.

AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR DE LA LANGUETTE DE TRACTION (FACULTATIF)

9. Retirer la bobine à lacet de la poche à languette et enrouler le lacet autour de la bobine pour raccourcir la longueur de la languette. Dérouler le lacet pour allonger la languette. (Figure E)
10. Insérer la bobine à lacet dans la poche à languette.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :



Laver à la main à l'eau (86°F/30°C) et au savon doux. Laisser sécher à l'air libre.

REMARQUE : Si le produit n'est pas suffisamment rincé, les résidus de savon peuvent provoquer des irritations et endommager le matériau.



NE PAS repasser.



NE PAS nettoyer à sec.



NE PAS utiliser d'eau de javel.

COMPOSITION DES MATÉRIAUX : Nylon, Polyester, Polyuréthane, Polyéthylène, Coton, Acrylique, Polypropylène, Silicone, Caoutchouc synthétique, EVA.

GARANTIE : DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité ainsi que ses accessoires en cas de défaut matériel ou de fabrication pendant une période de six mois à compter de la date d'achat. Si les conditions de cette garantie sont incompatibles avec la réglementation locale, les dispositions des réglementations locales s'appliquent.

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT UNIQUEMENT.



FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL.

AVIS : MÊME SI TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE ONT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.