



GAMME THERMOFORMABLE

*Une technologie innovante
Une protection optimale*



GAMME POIGNET



GAMME CORSET

Une réelle alternative à l'attelle de série et aux plâtres et résines classiques !

Grâce à sa technologie exclusive, Exos® est la seule marque à vous proposer une gamme d'orthèses thermoformables préformées, amovibles, ajustables, remodelables, étanches et radiotransparentes.

Une solution innovante pour le traitement de fractures et autres lésions traumatiques du poignet et de la main.

AMOVIBLE

Thermoformées selon la morphologie de votre patient, les orthèses Exos® peuvent se retirer facilement pour :

- Procéder à l'examen clinique de la zone lésée, de la plaie ou de la cicatrice
- Évaluer l'atrophie musculaire
- Entamer la rééducation de façon précoce
- Nettoyer la peau et l'orthèse



Rayons X sans orthèse



Rayons X avec orthèse



Un four Exos® est obligatoire pour thermoformer les attelles de la gamme.

Chauffer l'attelle dans le four pendant 3 à 5 minutes.



Ouvrez l'orthèse et positionnez-la sur le membre du patient.



Modelez l'orthèse avec précaution et ajustez-la de manière confortable pour le patient.



Les straps permettent la fermeture et l'immobilisation au niveau des doigts.



Découvrez en vidéo la Gamme Thermoformable Exos®

● 1^{ère} intention

○ 2^{ème} intention



EXOS® POUCE II
Page 2



EXOS® RHIZA
Page 2



EXOS® POIGNET-POUCE COURT
Page 3

ATTELLES DE POUCE ET POIGNET-POUCE

Pouce du skieur	●	○	
Entorse, luxation	○	○	○
Hyper-extension de l'articulation	○	○	
Fracture du scaphoïde			○
Rhizarthrose		●	
Ténosynovite de De Quervain			●



EXOS® POIGNET-MAIN
Page 4



EXOS® POIGNET-MAIN LONG
Page 3

ATTELLES DE POIGNET-MAIN

Fracture stable du poignet	○	○
Lésion du carpe ou des ligaments	○	
Entorse grave du poignet	●	○
Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire		○
Fracture stable de l'extrémité distale de l'ulna		●



EXOS® DOIGT EXTERNE
Page 5



EXOS® DOIGT INTERNE
Page 5



EXOS® BOXER EXTERNE
Page 6



EXOS® BOXER INTERNE
Page 6

ATTELLES DE DOIGTS ET POIGNET-DOIGTS

Fracture phalangienne des 2 ^{ème} /3 ^{ème} doigts	●			
Fracture phalangienne des 4 ^{ème} /5 ^{ème} doigts		●		
Fracture 2 ^{ème} /3 ^{ème} métacarpien			●	
Fracture 4 ^{ème} /5 ^{ème} métacarpien				●



EXOS FORM™ II
Page 7

CORSETS D'IMMOBILISATION

Hernie discale symptomatique aiguë	●
Fracture tassement rachis lombaire inférieur	○

EXOS®

EXOS® POUCE II



INDICATIONS :

- Pouce du skieur
- Entorse, dislocation
- Hyper-extension de l'articulation du pouce

CARACTÉRISTIQUES :

- Temps de chauffe : 3 minutes
- Ouverture du pouce plus large adaptée à un plus grand nombre de morphologies
- Revêtement Lycra®
- Traitement anti-microbien
- Bordure de finition autour du pouce pour un confort additionnel
- Un four Exos® est nécessaire pour thermoformer l'attelle
- Livré avec un strap amovible pour une meilleure immobilisation du pouce
- Modèle latéralisé
- Disponible en 6 tailles (de XXS à XL)

TAILLE	COLORIS	CIRC. MAIN	CODE ARTICLE	CODE ACL/GTIN
DROITE - XXS	NOIR	16,5 - 18,5 cm	212-22-1111	0190446327103
DROITE - XS	NOIR	18,5 - 20 cm	212-32-1111	3401029568897
DROITE - S	NOIR	20 - 23 cm	212-42-1111	3401029568958
DROITE - M	NOIR	23 - 25,5 cm	212-52-1111	3401029569030
DROITE - L	NOIR	25,5 - 28 cm	212-62-1111	3401029569269
DROITE - XL	NOIR	28 - 30,5 cm	212-72-1111	3401029569498
GAUCHE - XXS	NOIR	16,5 - 18,5 cm	212-21-1111	0190446327097
GAUCHE - XS	NOIR	18,5 - 20 cm	212-31-1111	3401029568149
GAUCHE - S	NOIR	20 - 23 cm	212-41-1111	3401029568200
GAUCHE - M	NOIR	23 - 25,5 cm	212-51-1111	3401029568378
GAUCHE - L	NOIR	25,5 - 28 cm	212-61-1111	3401029568439
GAUCHE - XL	NOIR	28 - 30,5 cm	212-71-1111	3401029568668

Prescrire : Exos® Pouce II - Remboursé S.S. - 43,32 € TTC - L.P.P.R. : 7142909

EXOS®

EXOS® RHIZA



INDICATIONS :

- Rhizarthrose
- Pouce du skieur
- Entorse, luxation de la colonne du pouce
- Hyper-extension de l'articulation

CARACTÉRISTIQUES :

- Temps de chauffe : 3 minutes
- Revêtement Lycra®
- Traitement anti-microbien
- Un four Exos® est nécessaire pour thermoformer l'attelle
- Livré avec un strap amovible pour une meilleure immobilisation du pouce
- Modèle latéralisé
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL)

TAILLE	COLORIS	CIRC. MAIN	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROITE - XS	NOIR	18,5 - 20 cm	213-32-1111	3401563532316
DROITE - S	NOIR	20 - 23 cm	213-42-1111	3401563532545
DROITE - M	NOIR	23 - 25,5 cm	213-52-1111	3401563532606
DROITE - L	NOIR	25,5 - 28 cm	213-62-1111	3401029502952
DROITE - XL	NOIR	28 - 30,5 cm	213-72-1111	3401029503034
GAUCHE - XS	NOIR	18,5 - 20 cm	213-31-1111	3401029527627
GAUCHE - S	NOIR	20 - 23 cm	213-41-1111	3401029527795
GAUCHE - M	NOIR	23 - 25,5 cm	213-51-1111	3401029527917
GAUCHE - L	NOIR	25,5 - 28 cm	213-61-1111	3401029528167
GAUCHE - XL	NOIR	28 - 30,5 cm	213-71-1111	3401029528228

Prescrire : Exos® Rhiza - Remboursé S.S. - 53,18 € TTC - L.P.P.R. : 7142269

EXOS®

EXOS® POIGNET-POUCE COURT



INDICATIONS :

- Ténosynovite de De Quervain
- Fracture du scaphoïde
- Fracture de la base du 1er métacarpien
- Entorse, luxation

CARACTÉRISTIQUES :

- Temps de chauffe : 5 minutes
- Revêtement Lycra®
- Traitement anti-microbien
- Un four Exos® est nécessaire pour thermoformer l'attelle
- Anneau de verrouillage disponible sur demande (livré avec taille XXS)
- Livré avec un strap amovible pour une meilleure immobilisation du pouce
- Modèle latéralisé
- Disponible en 6 tailles (de XXS à XL)

TAILLE	COLORIS	CIRC. MAIN	CODE ARTICLE	CODE ACL/GTIN
DROITE - XXS	NOIR	16,5 - 18,5 cm	232-22-1111	0190446327387
DROITE - XS	NOIR	18,5 - 20 cm	232-32-1111	3401029566886
DROITE - S	NOIR	20 - 23 cm	232-42-1111	3401029566947
DROITE - M	NOIR	23 - 25,5 cm	232-52-1111	3401029567029
DROITE - L	NOIR	25,5 - 28 cm	232-62-1111	3401029567197
DROITE - XL	NOIR	28 - 30,5 cm	232-72-1111	3401029567258
GAUCHE - XXS	NOIR	16,5 - 18,5 cm	232-21-1111	0190446327370
GAUCHE - XS	NOIR	18,5 - 20 cm	232-31-1111	3401029567548
GAUCHE - S	NOIR	20 - 23 cm	232-41-1111	3401029567487
GAUCHE - M	NOIR	23 - 25,5 cm	232-51-1111	3401029567609
GAUCHE - L	NOIR	25,5 - 28 cm	232-61-1111	3401029567777
GAUCHE - XL	NOIR	28 - 30,5 cm	232-71-1111	3401029567838

Prescrire : Exos® Poignet-Pouce Court - Remboursé S.S. - 94,40 € TTC - L.P.P.R. : 7142246

EXOS®

EXOS® POIGNET-MAIN LONG



INDICATIONS :

- Fracture stable de l'extrémité distale de l'ulna
- Entorse grave du poignet
- Fracture stable du poignet
- Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire

CARACTÉRISTIQUES :


- Temps de chauffe : 5 minutes
- Revêtement Lycra®
- Traitement anti-microbien
- Un four Exos® est nécessaire pour thermoformer l'attelle
- Anneau de verrouillage disponible sur demande (livré avec taille XXS)
- Modèle latéralisé
- Disponible en 6 tailles (de XXS à XL)

TAILLE	COLORIS	CIRC. MAIN	CODE ARTICLE	CODE ACL /GTIN
DROITE - XXS	NOIR	16,5 - 18,5 cm	311-22-1111	3401021480661
DROITE - XS	NOIR	18,5 - 20 cm	312-32-1111	0888912022750
DROITE - S	NOIR	20 - 23 cm	312-42-1111	0888912022774
DROITE - M	NOIR	23 - 25,5 cm	312-52-1111	0888912022804
DROITE - L	NOIR	25,5 - 28 cm	312-62-1111	0888912022835
DROITE - XL	NOIR	28 - 30,5 cm	312-72-1111	0888912022859
GAUCHE - XXS	NOIR	16,5 - 18,5 cm	311-21-1111	3401021478880
GAUCHE - XS	NOIR	18,5 - 20 cm	312-31-1111	0888912022743
GAUCHE - S	NOIR	20 - 23 cm	312-41-1111	0888912022767
GAUCHE - M	NOIR	23 - 25,5 cm	312-51-1111	0888912022781
GAUCHE - L	NOIR	25,5 - 28 cm	312-61-1111	0888912022828
GAUCHE - XL	NOIR	28 - 30,5 cm	312-71-1111	0888912022842

Prescrire : Exos® Poignet-Main Long - Remboursé S.S. - 56,64 € TTC - L.P.P.R. : 7143033

EXOS®

EXOS® POIGNET-MAIN

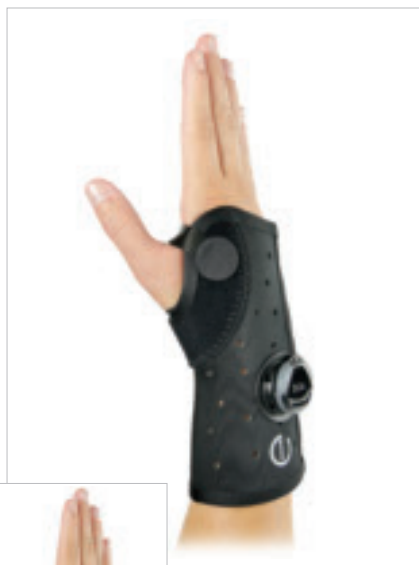

INDICATIONS :

- Entorse grave du poignet
- Lésion du carpe ou des ligaments
- Fracture stable du poignet (radius, styloïdes, carpe)

CARACTÉRISTIQUES :

- Temps de chauffe : 3 minutes
- Revêtement Lycra®
- Traitement anti-microbien
- Un four Exos® est nécessaire pour thermoformer l'attelle
- Anneau de verrouillage disponible sur demande (livré avec taille XXS)
- Modèle pédiatrique coloris Spider disponible en 3 tailles (de XXS à S)
- Modèle latéralisé
- Disponible en 6 tailles (de XXS à XL)

TAILLE	COLORIS	CIRC. MAIN	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROITE - XXS	NOIR	16,5 - 18,5 cm	221-22-1111	3401041424935
DROITE - XS	NOIR	18,5 - 20 cm	221-32-1111	3401041425017
DROITE - S	NOIR	20 - 23 cm	221-42-1111	3401041425185
DROITE - M	NOIR	23 - 25,5 cm	221-52-1111	3401041425246
DROITE - L	NOIR	25,5 - 28 cm	221-62-1111	3401041425307
DROIT - XL	NOIR	28 - 30,5 cm	221-72-1111	3401041425475
GAUCHE - XXS	NOIR	16,5 - 18,5 cm	221-21-1111	3401041423693
GAUCHE - XS	NOIR	18,5 - 20 cm	221-31-1111	3401041423983
GAUCHE - S	NOIR	20 - 23 cm	221-41-1111	3401041424126
GAUCHE - M	NOIR	23 - 25,5 cm	221-51-1111	3401041424355
GAUCHE - L	NOIR	25,5 - 28 cm	221-61-1111	3401041424645
GAUCHE - XL	NOIR	28 - 30,5 cm	221-71-1111	3401041424706
DROITE - XXS	SPIDER	16,5 - 18,5 cm	221-22-2293	3401020235774
DROITE - XS	SPIDER	18,5 - 20 cm	221-32-2293	3401020235835
DROITE - S	SPIDER	20 - 23 cm	221-42-2293	3401020236207
GAUCHE - XXS	SPIDER	16,5 - 18,5 cm	221-21-2293	3401020235606
GAUCHE - XS	SPIDER	18,5 - 20 cm	221-31-2293	3401020236085
GAUCHE - S	SPIDER	20 - 23 cm	221-41-2293	3401020236146



Découvrez la vidéo de mise en place de l'attelle Exos® Poignet-Main

Prescrire : Exos® Poignet-Main - Remboursé S.S. - 56,64 € TTC - L.P.P.R. : 7143033



EXOS®

EXOS® DOIGT EXTERNE

XXL



INDICATIONS :

- Fracture phalangienne des 2ème et 3ème doigts et des métacarpiens correspondants

CARACTÉRISTIQUES :

- Temps de chauffe : 3 minutes
- Autorise une mobilité complète du poignet
- Revêtement velours
- Lavable et résistante à l'eau
- Traitement anti-microbien
- Système de fermeture par 4 sangles auto-agrippantes et amovibles
- Un four Exos® est nécessaire pour thermoformer l'attelle
- Ne contient pas de latex
- Modèle latéralisé
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL)

TAILLE	COLORIS	CIRC. MAIN	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROITE - XS	NOIR	18,5 - 20 cm	126-32-1111	3401060109400
DROITE - S	NOIR	20 - 23 cm	126-42-1111	3401060109431
DROITE - M	NOIR	23 - 25,5 cm	126-52-1111	3401060109479
DROITE - L	NOIR	25,5 - 28 cm	126-62-1111	3401060109486
DROITE - XL	NOIR	28 - 30,5 cm	126-72-1111	3401060109493
GAUCHE - XS	NOIR	18,5 - 20 cm	126-31-1111	3401060106706
GAUCHE - S	NOIR	20 - 23 cm	126-41-1111	3401060106713
GAUCHE - M	NOIR	23 - 25,5 cm	126-51-1111	3401060106737
GAUCHE - L	NOIR	25,5 - 28 cm	126-61-1111	3401060106744
GAUCHE - XL	NOIR	28 - 30,5 cm	126-71-1111	3401060109394

Prescrire : Exos® Doigt Externe - Remboursé S.S. - 39,86 € TTC - L.P.P.R. : 7143027



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Exos® Doigt Externe

EXOS®

EXOS® DOIGT INTERNE

XXL



INDICATIONS :

- Fracture phalangienne des 4ème et 5ème doigts et des métacarpiens correspondants

CARACTÉRISTIQUES :

- Temps de chauffe : 3 minutes
- Autorise une mobilité complète du poignet
- Revêtement velours
- Traitement anti-microbien
- Système de fermeture par 4 sangles auto-agrippantes et amovibles
- Un four Exos® est nécessaire pour thermoformer l'attelle
- Ne contient pas de latex
- Modèle latéralisé
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL)

TAILLE	COLORIS	CIRC. MAIN	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROITE - XS	NOIR	18,5 - 20 cm	125-32-1111	3401060106645
DROITE - S	NOIR	20 - 23 cm	125-42-1111	3401060106652
DROITE - M	NOIR	23 - 25,5 cm	125-52-1111	3401060106676
DROITE - L	NOIR	25,5 - 28 cm	125-62-1111	3401060106683
DROITE - XL	NOIR	28 - 30,5 cm	125-72-1111	3401060106690
GAUCHE - XS	NOIR	18,5 - 20 cm	125-31-1111	3401060106591
GAUCHE - S	NOIR	20 - 23 cm	125-41-1111	3401060106607
GAUCHE - M	NOIR	23 - 25,5 cm	125-51-1111	3401060106614
GAUCHE - L	NOIR	25,5 - 28 cm	125-61-1111	3401060106621
GAUCHE - XL	NOIR	28 - 30,5 cm	125-71-1111	3401060106638

Prescrire : Exos® Doigt Interne - Remboursé S.S. - 39,86 € TTC - L.P.P.R. : 7143027



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Exos® Doigt Interne

EXOS®

EXOS® BOXER EXTERNE



INDICATIONS :

- Fractures du 2ème et/ou 3ème métacarpien

CARACTÉRISTIQUES :

- Temps de chauffe : 5 minutes
- Revêtement velours
- Traitement anti-microbien
- Anneau de verrouillage disponible sur demande
- 2 sangles de doigts amovibles
- Un four Exos® est nécessaire pour thermoformer l'attelle
- Modèle latéralisé
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL)

TAILLE	COLORIS	CIRC. MAIN	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROITE - XS	NOIR	18,5 - 20 cm	326-32-1111	3401021482092
DROITE - S	NOIR	20 - 23 cm	326-42-1111	3401021481903
DROITE - M	NOIR	23 - 25,5 cm	326-52-1111	3401021481842
DROITE - L	NOIR	25,5 - 28 cm	326-62-1111	3401021481781
DROITE - XL	NOIR	28 - 30,5 cm	326-72-1111	3401021481613
GAUCHE - XS	NOIR	18,5 - 20 cm	326-31-1111	3401021480890
GAUCHE - S	NOIR	20 - 23 cm	326-41-1111	3401021481033
GAUCHE - M	NOIR	23 - 25,5 cm	326-51-1111	3401021481323
GAUCHE - L	NOIR	25,5 - 28 cm	326-61-1111	3401021481491
GAUCHE - XL	NOIR	28 - 30,5 cm	326-71-1111	3401021481552

Prescrire : Exos® Boxer Externe - Remboursé S.S. - 79,20 € TTC - L.P.P.R. : 7143843

EXOS®

EXOS® BOXER INTERNE



INDICATIONS :

- Fractures du 4ème et/ou 5ème métacarpien

CARACTÉRISTIQUES :

- Temps de chauffe : 5 minutes
- Revêtement velours
- Traitement anti-microbien
- Anneau de verrouillage disponible sur demande
- 2 sangles de doigts amovibles
- Un four Exos® est nécessaire pour thermoformer l'attelle
- Modèle latéralisé
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL)

TAILLE	COLORIS	CIRC. MAIN	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROITE - XS	NOIR	18,5 - 20 cm	325-32-1111	3401021484454
DROITE - S	NOIR	20 - 23 cm	325-42-1111	3401021484225
DROITE - M	NOIR	23 - 25,5 cm	325-52-1111	3401021484164
DROITE - L	NOIR	25,5 - 28 cm	325-62-1111	3401021483914
DROITE - XL	NOIR	28 - 30,5 cm	325-72-1111	3401021483853
GAUCHE - XS	NOIR	18,5 - 20 cm	325-31-1111	3401021482962
GAUCHE - S	NOIR	20 - 23 cm	325-41-1111	3401021483044
GAUCHE - M	NOIR	23 - 25,5 cm	325-51-1111	3401021483273
GAUCHE - L	NOIR	25,5 - 28 cm	325-61-1111	3401021483334
GAUCHE - XL	NOIR	28 - 30,5 cm	325-71-1111	3401021483624

Prescrire : Exos® Boxer Interne - Remboursé S.S. - 79,20 € TTC - L.P.P.R. : 7143843

EXOS®

EXOS FORM™ II



INDICATIONS :

- Hernie discale
- Fracture vertébrale stable
- Fracture par tassements des corps vertébraux
- Spondylodiscite
- Chirurgie de la région lombaire
- Hyperlordose symptomatique

CARACTÉRISTIQUES :

- Constitué d'un panneau avant et arrière pré-formés et thermoformables (four Exos® : 5 minutes ou pistolet thermique à 77°) permettant au patient de la porter immédiatement
- Panneaux latéraux ajustables : permet de s'adapter à différents tours de taille pour une mise en place optimale
- Matériau thermoformable breveté V-STX™ utilisé pour la coque dorsale ainsi que la coque ventrale afin d'ajuster le dispositif à la lordose et à la morphologie du patient
- Mousse ComfortCORE™, épouse parfaitement la morphologie du patient et s'ajuste instantanément à ses mouvements : amélioration du confort patient
- Possibilité d'ajuster la ceinture tout au long de la rééducation et en post-rétablissement
- Technologie BOA® Le double système de fermeture permet de régler indépendamment le serrage de la partie supérieure et de la partie inférieure de la ceinture
- Maintien du sacrum à T9
- Pour nettoyer le corset, passer un linge humide
- Modèle mixte
- Disponible en 2 tailles (S/M et L/XL)



Découvrez la vidéo de mise en place du corset Exos Form™ II

TAILLE	CIRC. TAILLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
S/M	63 - 125 cm	300637-40	0888912588065
L/XL	125 - 152 cm	300637-60	0888912588072

Prescrire : Exos Form™ II - Remboursé S.S. - 167,69 € TTC - L.P.P.R. : 201E00,05

EXOS®

FOUR ET ACCESSOIRES



- Lisez tous les avertissements, mesures de sécurité et autres instructions avant d'utiliser l'appareil dans le manuel correspondant
- Ce four a été conçu pour chauffer uniquement des produits Exos®
- Ne chauffez aucun produit Exos® au-delà du temps recommandé
- Dimensions : 39,1 cm x 36,8 cm x 38,1 cm
- Poids : 4,1 kg
- Cycle de fonctionnement : continu
- Plage de températures du four : température ambiante à 99 °C +/- 20%
- Le four Exos® est 100% conforme à la directive RoHS
- Un anneau extenseur est disponible en option pour permettre le chauffage des grands modèles Exos® sans risque de toucher les éléments chauffants
- Garantie 1 an



Anneau d'extension de four Exos®

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	CODE ACL
FOUR EXOS®	800-OVEN-EURO	3401521495684
ACCESSOIRES GAMME EXOS®		
ANNEAU EXTENSEUR DE FOUR EXOS®	800-XR	3401060118174
RUBAN DE FINITION BORDURES NOIR (PAQUET DE 10 EX - 2 x 30,5 cm)	800-02-1111	3401521495974
ANNEAU DE VERROUILLAGE BOA® (SAUF EXOS® RHIZA)	800-LR6	0190446262015
MÈTRE RUBAN EXOS®	800-SIZINGTAPE	3401521496285
MANCHON DE PROTECTION EXOS® - XS/S	896-40-1111	3401563302766
MANCHON DE PROTECTION EXOS® - M	896-50-1111	3401563302827
MANCHON DE PROTECTION EXOS® - L/XL	896-60-1111	3401563303077
STRAP 10,2 cm - SACHET DE 10 EX	800-40-STRAP	0888912409100
STRAP 12,7 cm - SACHET DE 10 EX	800-50-STRAP	0888912409124

Prescrire : Exos Four - Non Remboursé S.S.

VOS OUTILS À DISPOSITION

POSTER EXOS®
RECTO/VERSO



TOTEM EXOS®
RECTO/VERSO



DJOSELECT.FR

Le site internet d'aide à la sélection de produits orthopédiques et vasculaires dédié uniquement aux professionnels de santé !



1 Design épuré et fonctionnel



2 Planches anatomiques 3D



3 Bibliothèque de vidéos de formation en ligne



4 Catalogue produit complet en Orthopédie et Vasculaire

Compatible tablettes & mobiles



Tous nos réseaux dans votre poche via notre lien LINKTREE
<https://linktr.ee/DJOfrance>

LA GAMME COMPLÈTE



EXOS POUCE II

INDICATIONS :

- Pouce du skieur, entorse, dislocation
- Hyper-extension de l'articulation du pouce

TAILLES : XXS - XL - droite ou gauche

L.P.P.R. : 43,32 €



EXOS RHIZA

INDICATIONS :

- Rhizarthrose
- Entorse de la colonne du pouce
- Fracture simple de la colonne du pouce

TAILLES : XS - XL - droite ou gauche

L.P.P.R. : 53,18 €



EXOS POIGNET-POUCE COURT

INDICATIONS :

- Ténosynovite de De Quervain
- Fracture du scaphoïde
- Entorse, luxation

TAILLES : XXS - XL - droite ou gauche

L.P.P.R. : 94,40€



EXOS POIGNET-MAIN

INDICATIONS :

- Entorse grave du poignet
- Lésion du carpe ou des ligaments
- Fracture stable du poignet (radius, styloïdes, carpe)

TAILLES : XS - XL - droite ou gauche

L.P.P.R. : 56,64 €



EXOS POIGNET-MAIN LONG

INDICATIONS :

- Fracture stable de l'extrémité distale de l'ulna
- Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire
- Entorse grave du poignet

TAILLES : XXS - XL - droite ou gauche

L.P.P.R. : 56,64 €



EXOS DOIGT EXTERNE

INDICATIONS :

- Fracture phalangienne des 2ème et 3ème doigts et des métacarpiens correspondants.

TAILLES : XS - XL - droite ou gauche

L.P.P.R. : 39,86 €



EXOS DOIGT INTERNE

INDICATIONS :

- Fracture phalangienne des 4ème et 5ème doigts et des métacarpiens correspondants.

TAILLES : XS - XL - droite ou gauche

L.P.P.R. : 39,86 €



EXOS BOXER EXTERNE

INDICATIONS :

- Fracture du 2ème et/ou 3ème métacarpien

TAILLES : XS - XL - droite ou gauche

L.P.P.R. : 79,20 €



EXOS BOXER INTERNE

INDICATIONS :

- Fracture du 4ème et/ou 5ème métacarpien

TAILLES : XS - XL - droite ou gauche

L.P.P.R. : 79,20 €




EXOS FORM™ II

INDICATIONS :

- Hernie discale
- Fracture vertébrale stable, ou par tassements des corps vertébraux
- Spondylodiscite
- Chirurgie de la région lombaire
- Hyperlordose symptomatique

TAILLES : S/M - L/XL

L.P.P.R. : 167,69 €

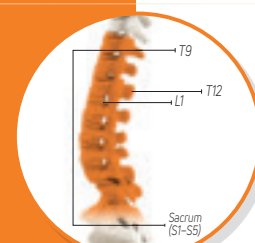



Retrouvez-nous en ligne

WEB BLOG | DJO SELECT | CEFAR TENS | YOUTUBE | LINKEDIN



DJO France S.A.S. | Centre Européen de Fret | 3 rue de Bethar | 64990 Mouguerre | France
Fabricant : DJO, LLC | 1430 Decision Street | Vista | CA 92081-8553 | USA



© DJO France - MKGBS670 - Rev. A - 05/2022 - Fabricant : DJO LLC.
Dispositifs médicaux de classe I qui portent, au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les notices et demander conseil à un professionnel de santé. Imp. : Varela - 101675