



LIRE ATTENTIVEMENT L'INTÉGRALITÉ DES PRÉSENTES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION DU PRODUIT. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION / INDICATIONS : Réparations post-opératoires de la coiffe des rotateurs, interventions de Bankart, déplacements capsulaires, luxations/subluxations gléno-humérales, distensions/réparations de tissus mous.

CONTRE-INDICATIONS : Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS : Consulter immédiatement un professionnel de santé en cas de douleur, de tuméfaction, de modification des sensations ou de toute autre réaction inhabituelle suite à l'utilisation de ce produit.

INFORMATIONS RELATIVES À LA MISE EN PLACE :

Pour garantir un bon ajustement, le produit doit être adapté au patient avant l'opération. Le produit est expédié avec les sangles et l'écharpe configurées pour une utilisation sur l'épaule/le bras droit. Afin de modifier le dispositif pour une utilisation sur le bras/l'épaule gauche, détacher les sangles du coussin abducteur, faire passer le coussin de l'autre côté de telle sorte que la boucle de la taille reste devant puis fixer l'écharpe à l'extérieur du coussin à l'aide de la bande Velcro.

ULTRASLING IV

1. Desserrer la ceinture sur le coussin et la sangle de l'avant-bras (ii) sur l'écharpe. Détacher la sangle de l'épaule (iii) en libérant les boucles à clip à l'avant de l'écharpe (fig. A).
2. Aligner le coussin sur le côté blessé au niveau de la taille/hanche avec le coude positionné à 90°. L'extrémité étroite du coussin doit être positionnée à l'arrière de l'avant-bras/du coude. Ramener la ceinture à l'avant et attacher la boucle sur le devant du coussin (fig. B). Régler les sangles pour obtenir l'ajustement souhaité, et les couper si besoin.
3. Positionner l'avant-bras dans l'écharpe en plaçant le bras le plus en retrait possible (fig. C). Fixer la sangle du pouce (i) entre le pouce et l'index à l'avant de l'écharpe. Fixer la courroie de l'avant-bras (ii) à l'écharpe et au coussin (fig. D).
4. Étirer le bras libre vers l'arrière et le faire glisser dans les sangles de l'épaule B et C (fig. E), comme si vous mettiez un sac à dos. Une sangle doit se trouver sur l'épaule saine (zone de la clavicule) et l'autre sous le bras (sangles B et C). Régler les deux sangles pour obtenir l'ajustement souhaité, et les couper si besoin.
5. Fixer la sangle de l'épaule A en la faisant passer dans l'anneau sur le devant de l'écharpe. Régler TOUTES les sangles pour obtenir une stabilisation adéquate de l'épaule blessée (fig. F). Retirer les languettes en Y aux extrémités des sangles et couper au besoin. Remettre les languettes en Y en place et fixer les sangles.

ULTRASLING IV AB

1. Desserrer la ceinture sur le coussin et la courroie de l'avant-bras (ii) sur l'écharpe. Détacher la sangle de l'épaule (iii) en libérant les boucles à clip à l'avant de l'écharpe (fig. A).
2. Placer le grand coussin sous la zone touchée avec un angle de 45° dirigé vers le haut. Attacher l'écharpe au coussin. Aligner la bande Velcro et fixer la boucle à l'avant du coussin (fig. B). Régler les sangles pour obtenir l'ajustement souhaité, et les couper si besoin.

3. Positionner l'avant-bras dans l'écharpe en plaçant le bras le plus en arrière possible (fig. C). Fixer la sangle du pouce (i) entre le pouce et l'index à l'avant de l'écharpe. Fixer la sangle de l'avant-bras (ii) à l'écharpe et au coussin (fig. D).
4. Étirer le bras libre vers l'arrière et le faire glisser dans les sangles de l'épaule B et C (fig. E), comme si vous mettiez un sac à dos. Une sangles doit se trouver sur l'épaule saine (zone de la clavicule) et l'autre sous le bras (sangles B et C). Régler les deux sangles pour obtenir l'ajustement souhaité, et les couper si besoin.
5. Régler la sangles de l'épaule A en la faisant passer dans l'anneau sur le devant de l'écharpe. Régler TOUTES les sangles pour obtenir une stabilisation adéquate de l'épaule blessée (fig. F). Retirer les languettes en Y aux extrémités des sangles et couper au besoin. Remettre les languettes en Y en place et fixer les sangles.

POUR UNE MISE EN PLACE EN SALLE D'OPÉRATION : Effectuer les étapes de mise en place 1 à 3 suivies des étapes suivantes : Détacher une extrémité de la sangles axillaire (sous l'aisselle) (Remarque : il est possible de retirer la courroie axillaire, selon les préférences). La sangles axillaire est la sangles C pour le bras droit et la sangles B pour le bras gauche. Ramener la courroie de l'épaule par-dessus l'épaule saine. Attacher les boucles à clip à l'écharpe. Ramener la sangles axillaire (sous l'aisselle) sous le bras et la faire passer dans l'anneau plat. Fixer la sangles à l'aide de l'attache Velcro.

REMARQUE : Les gros anneaux plats sur le devant (région pectorale/clavicule) et à l'arrière (omoplate) doivent être mis en place de façon à offrir le maximum de confort au patient.

POUR LA RÉÉDUCATION : Pour utiliser l'écharpe UltraSling IV sans le coussin pour le muscle abducteur, retirer la ceinture à l'avant et à l'arrière, et faire passer la ceinture dans les petits anneaux en D situés sur le devant et à l'arrière du côté interne de l'écharpe. Fixer la ceinture autour de la taille à l'aide des bandes Velcro. Couper si besoin.

UTILISATION ET ENTRETIEN : Laver à la main à l'eau froide à 30 °C. Suspender et laisser sécher.



GARANTIE : DJO, LLC réparera ou remplacera l'ensemble ou une partie du produit ainsi que ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une durée de six mois à compter de la date de vente.

SANS LATEX

CE DISPOSITIF EST DESTINÉ À UN USAGE UNIQUE SUR UN SEUL PATIENT

COMPOSITION DES MATÉRIAUX : Nylon, polyester, spandex, polyuréthane

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.